

La rimozione laser dei tatuaggi è considerata l'unica procedura medica efficace e sicura. Utilizzando una sequenza di impulsi laser di brevissima durata, nel regime dei picosecondi (millesimo di milionesimo di secondo), il laser è in grado di polverizzare l'inchiostro del tatuaggio. Le minuscole particelle prodotte verranno in seguito drenate naturalmente dall'organismo nel corso delle settimane successive al trattamento.

A CHI È RIVOLTO?

A persone che desiderano rimuovere sia interamente che parzialmente il proprio tatuaggio su quasi tutte le aree del corpo. Il professionista laser dovrà verificare i criteri di idoneità del paziente e le eventuali, anche se poco probabili, condizioni di esclusione al trattamento.

COSA DEVO FARE PRIMA DEL TRATTAMENTO?

È necessario che il paziente eviti l'utilizzo di lampade abbronzanti e l'esposizione solare per almeno un mese prima della seduta, avendo cura di utilizzare creme a protezione solare SPF 50+.

QUANTI TRATTAMENTI SONO NECESSARI?

Il numero di trattamenti necessari può variare in base a numerosi criteri, come il colore della pelle e del tatuaggio, la sua posizione, la quantità del suo inchiostro (stimata in base ad età ed intensità del colore), la sua estensione, e l'eventuale presenza di cicatrici. Mediamente sono necessarie dalle 4 alle 8 sedute intervallate da almeno due mesi per la rimozione del pigmento.

 **RENAISSANCE**[®]
The laser excellence

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.** e di **Quanta System**, due aziende italiane appartenenti ad un grande gruppo, la **El.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

DEKA
Innate Ability

Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekaitalia@deka.it
www.dekalaser.com
Tel. +39 055 8874942
Fax +39 055 8832884

Quanta System
LASER IN OUR DNA

Quanta System S.p.A.
www.quantasystem.com

Seguici su



www.renaissancelaser.it

Questo opuscolo è destinato a fornire informazioni di carattere generale. Per ulteriori informazioni relative alla propria situazione specifica, consultare il proprio medico.

Timbro del centro medico

RENAISSANCE[®] - Tutti i diritti riservati.
Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le caratteristiche tecniche senza preavviso - Riservato ai professionisti sanitari

La rivoluzione del colore nella rimozione dei tatuaggi

Laser Discovery PICO



QUANTO DURA UNA SEDUTA?

La durata del trattamento dipende dalle dimensioni del tatuaggio e dai colori che lo compongono. Per tatuaggi di piccole e medie dimensioni, la seduta può durare pochi minuti. Per tatuaggi multicolori di medie più grandi invece potrebbero essere necessari circa 10-30 minuti e talvolta anche di più.

IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?

Il paziente potrà avvertire come un colpo di elastico sulla pelle. Il fastidio, normalmente sopportabile, potrà essere ulteriormente attenuato da un sistema di raffreddamento della pelle o, in particolari casi, dall'applicazione di anestetico topico o locale.

COSA DEVO FARE DOPO IL TRATTAMENTO?

La pelle della maggior parte delle persone trattate con il laser sviluppa sull'area una velatura bianca, detta "frosting", per circa 20 minuti, seguita da un edema (gonfiore) associato ad un arrossamento cutaneo che può durare 2 o 3 giorni. In rari casi è possibile che si presentino piccole vescicole e lievi perdite di sangue per le quali lo specialista prescriverà le corrette medicazioni.

QUALI RISULTATI POSSO ASPETTARMI?

Nel corso di poche settimane sarà possibile notare una serie di cambiamenti: l'inchiostro inizierà a sbiadire ed alcune aree cutanee a schiarire leggermente. Le variazioni saranno progressive e i colori sbiadiranno dopo ogni trattamento. È possibile che si presenti uno schiarimento transitorio della pelle circostante il tatuaggio che ritornerà al colore naturale in qualche mese. Il risultato finale sarà visibile alcuni mesi dopo l'ultima seduta laser.

ADATTO A
TUTTI I TIPI
DI TATUAGGIO

POLVERIZZAZIONE
FINISSIMA DEL
PIGMENTO, FACILITA
L'ELIMINAZIONE

RISULTATI
PROGRESSIVI E
DEFINITIVI

RISULTATI



Prima



Dopo

4 Trattamenti
Per gentile concessione del Prof. N. Zerbinati, Pavia



Prima



Dopo

4 Trattamenti
Per gentile concessione del Prof. N. Zerbinati, Pavia



Prima



Dopo

5 Trattamenti
Per gentile concessione del Prof. N. Zerbinati, Pavia