

La pelle invecchia troppo in fretta. Spesso è colpa del tempo che passa, ma il motivo principale risiede in uno stile di vita sbagliato: alcool, fumo, errata alimentazione ed esposizione prolungata al sole sono le cause primarie di un invecchiamento precoce. Grazie alla tecnologia laser CO<sub>2</sub>, e con un minimo investimento del tuo tempo, potrai intervenire sugli inestetismi della pelle, come rughe, cicatrici da acne o varicella, stimolando la rigenerazione dei tessuti e riscoprendo una pelle liscia e curata.

## A CHI È RIVOLTO?

Il trattamento è indicato per tutti i tipi di pelle. Il medico potrà valutare il grado di abbronzatura per identificare al meglio tempi e caratteristiche delle sedute.

## COSA DEVO FARE PRIMA DEL TRATTAMENTO?

Il paziente dovrà evitare l'uso di lampade abbronzanti e l'esposizione solare per almeno un mese prima del trattamento. La pelle al momento della seduta dovrà essere ben deteresa e priva di cosmetici ed il paziente non dovrà aver assunto farmaci che ne possano alterare la sensibilità alla luce. Il trattamento è normalmente ben tollerato, tuttavia, il medico potrà consigliare l'applicazione di una crema anestetica 40 minuti prima della seduta. Un accurato colloquio con il medico consentirà di valutare e programmare l'intervento.

## QUANTI TRATTAMENTI SONO NECESSARI?

Per un trattamento efficace occorrono mediamente da 1 a 3 sedute intervallate da almeno 45/60 giorni. Ogni paziente avrà un piano differenziato in base alla tipologia, sede e profondità dell'inestetismo oltre al tipo e colore della pelle.

 **RENAISSANCE**<sup>®</sup>  
The laser excellence

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.** e di **Quanta System**, due aziende italiane appartenenti ad un grande gruppo, la **El.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

**DEKA**  
Innate Ability

Deka M.E.L.A. S.r.l.  
dekatalia@deka.it  
www.dekalaser.com  
Tel. +39 055 8874942  
Fax +39 055 8832884

**Quanta System**  
LASER IN OUR DNA

Quanta System S.p.A.  
www.quantasystem.com

Seguici su



[www.renaissancelaser.it](http://www.renaissancelaser.it)

Questo opuscolo è destinato a fornire informazioni di carattere generale. Per ulteriori informazioni relative alla propria situazione specifica, consultare il proprio medico.

Timbro del centro medico

RENAISSANCE<sup>®</sup> - Tutti i diritti riservati.  
Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le caratteristiche tecniche senza preavviso - Riservato ai professionisti sanitari

**Laser CO<sub>2</sub>**

Dedica un'ora  
del tuo tempo  
alla bellezza

MEDICINA ED ESTETICA



TRATTAMENTI  
BREVI

STIMOLAZIONE  
DEL  
COLLAGENE

TEMPI  
DI RECUPERO  
RIDOTTI

## QUANTO DURA UNA SEDUTA?

Il trattamento può variare da 15 a 30 minuti in base alla zona da trattare e può essere effettuato in ogni momento della giornata.

## IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?

Il trattamento è ben tollerabile. Il paziente potrà avvertire una lieve sensazione di bruciore transitoria.

## COSA DEVO FARE DOPO IL TRATTAMENTO?

Presentando un leggero arrossamento che sparirà in 4/7 giorni, il paziente dovrà applicare compresse di ghiaccio e creme lenitive ed antibiotiche sulla zona trattata. Successivamente sarà di nuovo possibile usare cosmetici ed esporsi al sole, utilizzando una crema protettiva per almeno 30 giorni dalla fine del trattamento. La protezione solare è comunque fortemente consigliata senza limitazioni di durata.

## QUALI RISULTATI POSSO ASPETTARMI?

La pelle sarà levigata, tonica e compatta già dopo i primi giorni. Il paziente potrà assistere a un miglioramento continuo nei sei mesi successivi, grazie alla formazione di nuovo collagene, con risultati concreti e duraturi.

## RISULTATI



### Rughe severe

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze



### Cicatrici acneiche

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze



### Skin Resurfacing tradizionale

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze



### Smagliature

Per gentile concessione della Dr.ssa. M. N. Liscio, Alba Adriatica (TE)