

Le lesioni pigmentate senili e solari, sono macchie della pelle che si originano con il passare dell'età soprattutto sulle zone del corpo maggiormente esposte alla luce solare. Altre macchie cutanee invece hanno origine diversa e possono essere presenti anche dalla nascita o comparire a seguito di gravidanze. La tecnologia laser Q-Switch è in grado di emettere emissioni laser ad impulsi di durata molto breve, che interagiscono selettivamente con le macchie della pelle, rimuovendole in modo da offrire risultati efficaci e veloci.

## A CHI È RIVOLTO?

A persone che presentano macchie cutanee che sono state chiaramente identificate come benigne dal medico. Le macchie devono anche essere di tipologia trattabile con laser, come le lentigo, le lentiggini, i nevi di Ito e Ota e alcuni tipi di melasma e macchie post-gravidanza.

## COSA DEVO FARE PRIMA DEL TRATTAMENTO?

È preferibile evitare l'esposizione della cute da trattare al sole o a lampade abbronzanti per almeno un mese, avendo cura di utilizzare creme solari filtranti ad alta protezione (SPF 30+ o 50+). Il medico potrebbe anche chiedere di applicare creme preparatorie al trattamento, prima delle sedute.

## QUANTI TRATTAMENTI SONO NECESSARI?

Questo tipo di trattamento può richiedere da una ad alcune sedute in base alla natura della pigmentazione cutanea.

 **RENAISSANCE®**  
The laser excellence

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.** e di **Quanta System**, due aziende italiane appartenenti ad un grande gruppo, la **El.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

**DEKA**  
Innate Ability

Deka M.E.L.A. S.r.l.  
dekaitalia@deka.it  
www.dekalaser.com  
Tel. +39 055 8874942  
Fax +39 055 8832884

**Quanta System**  
LASER IN OUR DNA

Quanta System S.p.A.  
www.quantasystem.com

Seguici su



[www.renaissancelaser.it](http://www.renaissancelaser.it)

Questo opuscolo è destinato a fornire informazioni di carattere generale. Per ulteriori informazioni relative alla propria situazione specifica, consultare il proprio medico.

Timbro del centro medico

RENAISSANCE® - Tutti i diritti riservati.  
Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le caratteristiche tecniche senza preavviso - Riservato ai professionisti sanitari

Rimuovi le macchie della pelle con il laser Q-Switch

**Tecnologia Q-Switch**

MEDICINA ED ESTETICA

EMISSIONI  
LASER A IMPULSI  
DI BREVE  
DURATA

TRATTAMENTI  
VELOCI

RISULTATI  
EFFICACI

## QUANTO DURA UNA SEDUTA?

Il tempo di ogni seduta è di pochi minuti e dipende in genere dal numero e dall'estensione delle macchie presenti.

## IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?

Il trattamento è praticamente indolore, si percepisce solo un leggero pizzicore. Per i primi 10 minuti post trattamento il paziente potrà avvertire un leggero fastidio che tenderà a svanire velocemente senza dover ricorrere ad alcun tipo di farmaco.



## COSA DEVO FARE DOPO IL TRATTAMENTO?

Sarà possibile notare nell'area trattata un arrossamento che tenderà ad attenuarsi in poche ore. La macchia trattata potrebbe scurirsi per circa una o due settimane. Si dovrà evitare di applicare cosmetici e di bagnare la zona trattata con acqua molto calda per due o tre giorni. Il paziente dovrà proteggere la zona trattata con schermo solare per almeno 4-6 settimane dopo il trattamento.

## QUALI RISULTATI POSSO ASPETTARMI?

A seconda della tipologia di macchia trattata, è possibile osservare il miglioramento o la rimozione in tempi variabili da 2 a 4 settimane dopo ogni seduta. Le zone trattate esposte alla luce solare dovranno essere protette adeguatamente per ritardare il formarsi di nuove pigmentazioni.


## RISULTATI PRE-POST

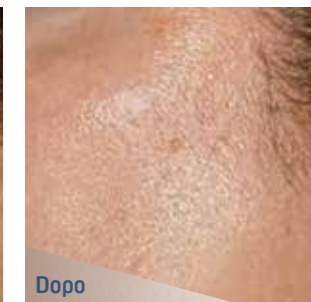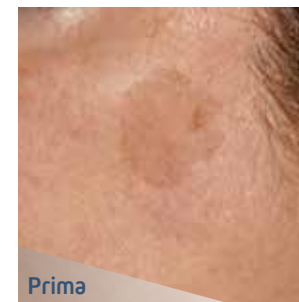

### Lesioni pigmentate

1 Trattamento

Per gentile concessione del Dr. D. Piccolo, Pescara

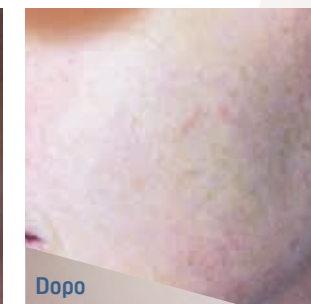

### Lesioni pigmentate

1 Trattamento

Per gentile concessione del Dr. Paolo Sbano, Viterbo



### Nevo di Ota

3 Trattamenti

Per gentile concessione del Prof. G. Cannarozzo - Università Tor Vergata, Roma