

Con l'esclusiva Mixed Technology™ è possibile effettuare trattamenti di laser epilazione, superando i limiti delle pelli abbronzate e di tipo mediterraneo, riducendo progressivamente, seduta dopo seduta, i peli superflui. Questa tecnologia è in grado di trasmettere selettivamente l'energia al follicolo per eliminare le strutture responsabili della crescita del pelo. Vengono così ridotti i rischi di effetti indesiderati sulla normale pigmentazione della pelle rendendo il trattamento più semplice ed efficace.

## A CHI È RIVOLTO?

L'epilazione laser con Mixed Technology™ è un trattamento estremamente innovativo. È efficace su carnagioni chiare, intermedie e scure e su diversi tipi di colore e spessore dei peli.

## COSA DEVO FARE PRIMA DEL TRATTAMENTO?

Per una corretta riuscita del trattamento è necessario che il paziente effettui, uno o due giorni prima della seduta, una rasatura dell'area da trattare. Sono da evitare la pratica della ceretta, l'applicazione di creme o altri cosmetici, oltre che l'utilizzo di lampade abbronzanti e l'esposizione solare per almeno tre settimane prima della seduta.

## QUANTE SEDUTE SONO NECESSARIE?

Per un trattamento efficace occorrono dalle 4 alle 8 sedute a seconda della zona trattata, delle condizioni dei peli, della colorazione della pelle e dello stato ormonale del paziente.

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.**, **Quanta System** ed **Asclepion Laser Technologies** tre aziende appartenenti ad un grande gruppo, la **El.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

**DEKA**  
Innate Ability

Deka M.E.L.A. S.r.l.  
dekatalia@deka.it  
www.dekalaser.com  
Tel. +39 055 8874942  
Fax +39 055 8832884

**Quanta System**  
LASER IN OUR DNA

Quanta System S.p.A.  
www.quantasystem.com

Seguici su



[www.renaissancelaser.it](http://www.renaissancelaser.it)

Questo opuscolo è destinato a fornire informazioni di carattere generale.  
Per ulteriori informazioni relative alla propria situazione specifica,  
consultare il proprio medico.

**ELEN**<sup>™</sup>

Timbro del centro medico

RENAISSANCE<sup>®</sup> - Tutti i diritti riservati.  
Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le  
caratteristiche tecniche senza preavviso - Riservato ai professionisti sanitari

# L'evoluzione dell'epilazione laser medicale

**Mixed Technology™**



SEDUTE  
VELOCI

TRATTAMENTO  
INDOLORE

RISOLUTIVA  
IN CASI DI  
FOLLICOLITE

## QUANTO DURA UNA SEDUTA?

La durata di una seduta dipende dall'estensione della zona da trattare. Per la rimozione dei peli sotto le ascelle occorrono in media pochissimi minuti. Per le aree più ampie, come gambe o schiena, è necessario considerare almeno 30 minuti di seduta.

## IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?

Il trattamento è normalmente ben tollerato dai pazienti grazie anche all'azione combinata (con l'emissione laser) di un sistema di raffreddamento della pelle dal duplice effetto protettivo e analgesico.

## COSA DEVO FARE DOPO IL TRATTAMENTO?

Immediatamente dopo il trattamento, a discrezione dell'operatore, potrebbero essere applicati impacchi freddi o creme lenitive per ridurre l'arrossamento e il lieve senso di calore che possono persistere per qualche ora. Nelle 24-48 ore successive è opportuno evitare sport che possono provocare un'intensa sudorazione, docce con acqua eccessivamente calda e l'applicazione di profumi e deodoranti a base alcolica.



Per i successivi 15 giorni si deve evitare l'esposizione al sole o a lampade abbronzanti. Successivamente, nel caso di esposizione solare, sarà necessario utilizzare una crema a protezione SPF 50+ per alcune settimane dal trattamento.

## QUALI RISULTATI POSSO ASPETTARMI?



Il risultato è l'evidente riduzione dei peli scuri nella zona trattata con un basso rischio di follicoliti e peli incarniti tipici dei metodi classici di depilazione.

 **RENAISSANCE**<sup>®</sup>  
The laser excellence



## RISULTATI PRE-POST

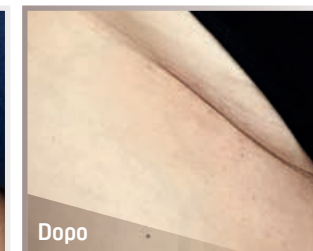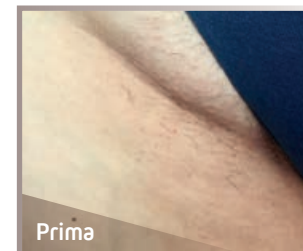


Per gentile concessione del Dr. Paolo Sbano, Viterbo

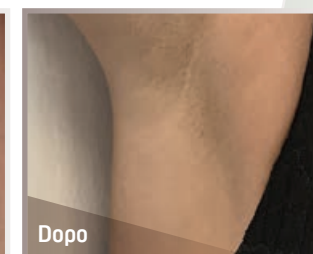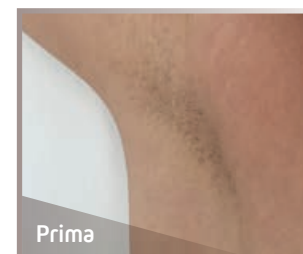

Per gentile concessione del Dr. Paolo Sbano, Viterbo

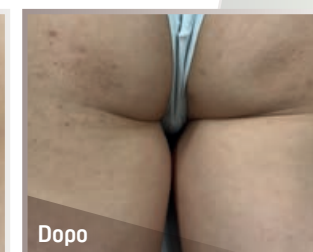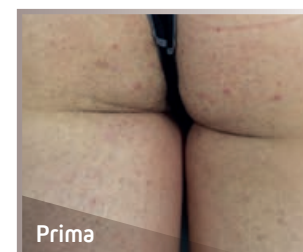

Per gentile concessione del Dr. Luigi Coricciati, Martano (LE)

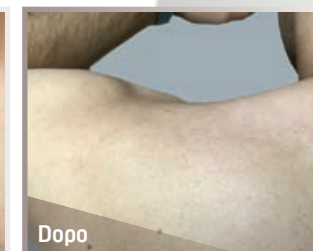

Per gentile concessione del Dr. Paolo Sbano, Viterbo

