



La rimozione laser dei tatuaggi è considerata l'unica procedura medica efficace e sicura. Utilizzando una sequenza di impulsi laser di brevissima durata, nel regime dei picosecondi (millesimo di milionesimo di secondo), il laser è in grado di polverizzare l'inchiostro del tatuaggio. Le minuscole particelle prodotte verranno in seguito drenate naturalmente dall'organismo nelle settimane successive al trattamento.

A CHI È RIVOLTO?

Il trattamento è indicato per coloro che desiderano rimuovere sia interamente che parzialmente il proprio tatuaggio su quasi tutte le aree del corpo. Il medico dovrà verificare i criteri di idoneità del paziente e le eventuali, anche se poco probabili, condizioni di esclusione al trattamento.

COSA DEVO FARE PRIMA DEL TRATTAMENTO?

Il paziente deve evitare l'utilizzo di lampade abbronzanti e l'esposizione solare per almeno un mese prima della seduta, avendo cura di utilizzare creme a protezione solare SPF 50+.

QUANTI TRATTAMENTI SONO NECESSARI?

Il numero di trattamenti può variare in base a numerosi criteri, quali il colore della pelle e del tatuaggio, la sua posizione, la quantità del suo inchiostro (stimata in base ad età ed intensità del colore), la sua estensione e l'eventuale presenza di cicatrici. Mediamente sono necessarie dalle 4 alle 8 sedute intervallate da almeno due mesi per la rimozione del pigmento.



Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.**, **Quanta System** ed **Asclepion Laser Technologies** tre aziende appartenenti ad un grande gruppo, la **El.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.



Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekaitalia@deka.it
www.dekalaser.com
Tel. +39 055 8874942
Fax +39 055 8832884



Quanta System S.p.A.
www.quantasystem.com

Seguici su



www.renaissancelaser.it

Questo opuscolo è destinato a fornire informazioni di carattere generale. Per ulteriori informazioni relative alla propria situazione specifica, consultare il proprio medico.



Timbro del centro medico

RENAISSANCE® - Tutti i diritti riservati.
Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le caratteristiche tecniche senza preavviso - Riservato ai professionisti sanitari

La rivoluzione del colore nella rimozione dei tatuaggi

Laser Discovery PICO



**POLVERIZZAZIONE
FINISSIMA DEL
PIGMENTO, FACILITA
L'ELIMINAZIONE**

**ADATTO A
TUTTI I TIPI
DI TATUAGGIO**

**RISULTATI
PROGRESSIVI E
DEFINITIVI**



QUANTO DURA UNA SEDUTA?

La durata del trattamento dipende dalle dimensioni del tatuaggio e dai colori che lo compongono. Per tatuaggi di piccole e medie dimensioni, la seduta può durare pochi minuti. Per tatuaggi multicolore più grandi invece potrebbero essere necessari circa 10-30 minuti.

IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?

Il paziente potrà avvertire come un colpo di elastico sulla pelle. Il fastidio, normalmente sopportabile, potrà essere ulteriormente attenuato da un sistema di raffreddamento della pelle o, in particolari casi, dall'applicazione di anestetico topico locale.

COSA DEVO FARE DOPO IL TRATTAMENTO?


Nella maggior parte dei casi si sviluppa sull'area trattata una velatura bianca, detta "frosting", per circa 20 minuti, seguita da un edema (gonfiore) associato ad un arrossamento cutaneo che può durare 2 o 3 giorni. In rari casi è possibile che si presentino piccole vescicole e lievi perdite di sangue per le quali lo specialista prescriverà le adeguate medicazioni.

QUALI RISULTATI POSSO ASPETTARMI?

Nel corso di poche settimane si noteranno una serie di cambiamenti: l'inchiostro inizierà a sbiadire ed alcune aree cutanee a schiarire leggermente. Le variazioni saranno progressive e i colori sbiadiranno dopo ogni trattamento. Potrebbe verificarsi uno schiarimento transitorio della pelle circostante il tatuaggio che ritornerà al colore naturale in qualche mese. Il risultato finale sarà visibile alcuni mesi dopo l'ultima seduta laser.

 **RENAISSANCE**[®]
The laser excellence

RISULTATI PRE-POST

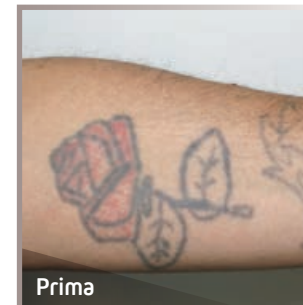


Prima



Dopo

4 Trattamenti
Per gentile concessione del Prof. N. Zerbinati, Pavia

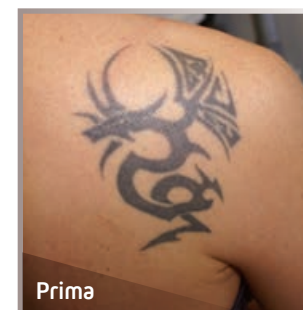


Prima



Dopo

4 Trattamenti
Per gentile concessione del Prof. N. Zerbinati, Pavia

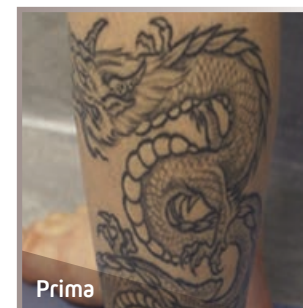

Prima



Dopo

5 Trattamenti
Per gentile concessione del Prof. N. Zerbinati, Pavia