

I capillari rossi e blu delle gambe e del volto, rappresentano uno degli inestetismi più diffusi tra le persone di tutte le età.

Il trattamento delle lesioni vascolari con Mixed Technology™, sfrutta l'emissione di due impulsi laser immediatamente consecutivi, prima Alexandrite 755 nm e subito dopo Nd:YAG 1064 nm. Questa modalità sequenziale, rispetto all'utilizzo dei singoli laser, consente di ridurre l'energia laser erogata e quindi il fastidio prodotto durante il trattamento sul vaso sanguigno da rimuovere.

A CHI È RIVOLTO?

Il trattamento è indicato per i capillari e le teleangectasie (reticoli di piccole vene dilatate). Il sistema laser estremamente all'avanguardia, consente di trattare anche capillari blu di medie dimensioni.

COSA DEVO FARE PRIMA DEL TRATTAMENTO?

Il paziente dovrà evitare l'uso di lampade abbronzanti e l'esposizione solare fino ad un mese prima della seduta. È preferibile effettuare il trattamento durante i mesi con minore intensità di luce solare, perciò durante l'autunno, l'inverno e i primi mesi primaverili.

QUANTI TRATTAMENTI SONO NECESSARI?

Un trattamento laser efficace necessita mediamente di due o tre sedute da ripetere con intervallo di tempo che va dai 30 giorni ai 3 mesi, in base al caso.

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.**, **Quanta System** ed **Asclepion Laser Technologies** tre aziende appartenenti ad un grande gruppo, la **El.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

DEKA
Innate Ability

Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekaitalia@deka.it
www.dekalaser.com
Tel. +39 055 8874942
Fax +39 055 8832884

Quanta System
LASER IN OUR DNA

Quanta System S.p.A.
www.quantasystem.com

Seguici su



www.renaissancelaser.it

Questo opuscolo è destinato a fornire informazioni di carattere generale.
Per ulteriori informazioni relative alla propria situazione specifica,
consultare il proprio medico.

ELEN[™]

Timbro del centro medico

RENAISSANCE[®] - Tutti i diritti riservati.
Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le
caratteristiche tecniche senza preavviso - Riservato ai professionisti sanitari

Rimuovi i capillari dalle gambe e dal volto

Laser con Mixed Technology



RENAISSANCE[®]
The laser excellence

**ENERGIA
LASER RIDOTTA
PER MAGGIOR
COMFORT**

**ADATTO
ANCHE A
CAPILLARI
BLU DI MEDIE
DIMENSIONI**

**SEDUTE
VELOCI**



QUANTO DURA UNA SEDUTA?

Il tempo di ciascuna seduta può variare in base alla zona da trattare, da alcuni minuti fino all'incirca un'ora per le aree più ampie.

IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?

Si avverte solitamente una lieve sensazione di bruciore che cessa immediatamente dopo l'impulso laser, senza mai risultare eccessivamente doloroso. Il laser è dotato di un potente sistema di raffreddamento della pelle che rende il trattamento sopportabile.

COSA DEVO FARE DOPO IL TRATTAMENTO?

Nella zona trattata si manifesterà un eritema che normalmente scompare nel corso di qualche ora, seguito da un leggero gonfiore transitorio (edema). Il paziente potrà applicare impacchi freddi e creme lenitive sulla zona interessata. Nei giorni successivi al trattamento, i capillari trattati potrebbero inizialmente scurirsi e poi gradualmente diventare meno visibili fino, in alcuni casi, alla totale scomparsa già alla prima seduta. Questo processo può durare anche alcune settimane. Al termine di ogni seduta sarà necessario evitare l'esposizione solare fino alla normalizzazione delle aree trattate.

QUALI RISULTATI POSSO ASPETTARMI?


Il trattamento laser con Mixed Technology™, è in grado di migliorare ed eliminare i capillari visibili sulla pelle. Tuttavia, il laser non è in grado di eliminare le cause che hanno determinato il formarsi dei capillari e quindi la durata dei risultati dipenderà molto dalle caratteristiche della pelle di ogni paziente.

 **RENAISSANCE**[®]
The laser excellence

RISULTATI PRE-POST



Per gentile concessione del Dr. Paolo Sbano, Viterbo

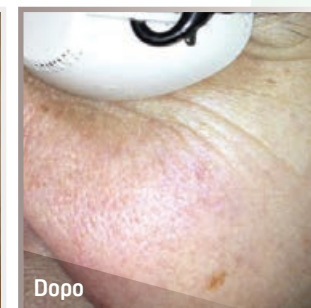

Per gentile concessione del Dr. Paolo Sbano, Viterbo



Per gentile concessione del Dr. Paolo Sbano, Viterbo